

## Mascarilla Quirúrgica – Tipo I

### WECKERLE - HEALTH CARE

Mascarilla quirúrgica descartable, Tipo I, de 3 capas, con tiras elásticas y clip nasal ajustable.



### Características

- Compuesta de un cuerpo de máscara facial de 3 capas.
- Esta mascarilla, está diseñada para reducir el riesgo de propagación de infecciones, brindando protección contra salpicaduras y gotas.
- Diseño por el cual puede ajustarse estrechamente sobre la nariz, la boca y el mentón del usuario.
- Clip nasal, para adaptarse al contorno de la nariz.



**Producto fabricado en China, bajo estándares de calidad de Weckerle Group - Alemania**

### Dimensiones

17.5 cm de longitud x 9.5 cm de altura.

### Materiales

Las capas interna y externa están hechas de telas no tejidas de polipropileno, y la capa intermedia está hecha de tela de polipropileno soplado por fusión, que actúa como medio filtrante.

### Cobertura de Riesgo/Usos previstos

Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas.

Uso regular para evitar la propagación o inhalación de bacterias y virus transmitidos con esputo.

## Presentación

50 unidades, dentro de una caja de cartón simple de 19.5cm X 10cm X 7.5cm

Empaque secundario: 40 cajas de cartón, en una caja de cartón corrugado de 53cm x 40cm x 33cm

## Certificaciones

EN 14683 - Tipo I BFE 95%.

Aprobación FDA.

## Advertencias

Las mascarillas quirúrgica tipo I solo deben usarse para pacientes y otras personas para reducir el riesgo de propagación de infecciones particularmente en situaciones de epidemia o pandemia.

Las máscaras tipo I no están destinadas para ser utilizadas por profesionales de la salud en un quirófano o en otros entornos médicos con requisitos similares.

## Instrucciones de Uso Correcto

1. Antes de tocar una mascarilla limpia, debe haber un previo lavado de manos con agua y jabón.
2. Una vez, se haya tomado una mascarilla nueva (sin uso) de la caja, revisar, para asegurar, que no tenga defectos, agujeros, ni desgarros en el material. Si la mascarilla, tiene alguna de estas deficiencias, desechar y sacar otra nueva de la caja.
3. Orientar, la parte superior de la mascarilla, correctamente, para que quede lo más cerca posible de la piel, tener en cuenta que la parte superior dela misma, tiene un borde flexible, con una cinta metálica recubierta, que puede moldear alrededor de la nariz.
4. Cerciorarse que ese lado esté orientado hacia arriba antes de colocar la mascarilla.
5. Asegurarse que el lado correcto de la mascarilla quede hacia afuera: El interior de la mascarilla es de color blanco, mientras que el exterior es de otros colores. Antes de ponerla, revisar que el lado blanco vaya hacia la cara.

6. Fijar la mascarilla, hacia la cabeza, por medio de las dos bandas para las orejas. Tomar las bandas y poner una, alrededor de una de las orejas y luego la otra, alrededor de la del otro lado.

7. Ajustar la pieza que va en la nariz; cuando la mascarilla, esté en su lugar, en la cabeza y la cara, usar el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior, alrededor del puente de la nariz, para buscar que haya un ajuste correcto.

8. Ajustar la mascarilla en la cara y debajo de la barbilla, una vez que, esté totalmente asegurada, acomodar para que cubra la cara y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de la barbilla.

